

# Technische informatie

## COMBINATIEWERKSTUKKEN



Combinatiewerkstukken combineren een uitneembare prothese met vaste restauraties, zoals kronen of bruggen. Dankzij precisieankers ontstaat een stabiele, esthetische en comfortabele oplossing zonder zichtbare klammers.



### Esthetiek

- Natuurlijke uitstraling zonder zichtbare klammers.
- Esthetische integratie met bestaande dentitie.
- Discreet bevestigingssysteem.



### Indicatie

- Partiële protheses met verhoogde retentie-eisen.
- Situaties waarin klammers esthetisch ongewenst zijn.
- Patiënten met metaalallergieën (nikkelvrij mogelijk).
- Complexe restauraties met combinatie van vast en uitneembaar werk).



### Preparatie en plaatsing

#### ONDERSTEUNING

- Afstemming tussen behandelaar en DCRM aanbevolen
- Ontwerp afhankelijk van indicatie en retentie-eisen

#### AFDRUK

- Digitaal of conventioneel
- Siliconen of elastomeren
- Geen alginaten.

#### PLAATSING

- Cementeren of verlijmen volgens ontwerp en indicatie



### Voordelen

- Sterke en stabiele verbinding.
- Verbeterde retentie en draagcomfort.
- Esthetisch alternatief voor frameprotheses met klammers.
- Mogelijkheid tot individueel ontwerp.



### Informatie

#### MATERIAAL

- Precisie-ankers van gerenommeerde fabrikanten (o.a. Preci-Vertex®).
- Gekoppelde draaidelen en staafsystemen.
- CoCr (bijv. Bego Wironit)

#### TECHNIEK

- Precisiebevestigingen geïntegreerd in kroon- en brugwerk.
- Zorgt voor een stabiele en duurzame verbinding.

## Tip van onze tandtechnische adviseur Francois



Wanneer klammers esthetisch ongewenst zijn, bieden combinatiewerkstukken vaak een mooie oplossing. Dankzij precisieankers ontstaat een stabiele en comfortabele voorziening met een natuurlijke uitstraling.

François, tandtechnische adviseur Protilab

