

# Technische informatie

## EASYFIT® ULTRA-DUNNE FACINGS



Easyfit® facings zijn ultra-dunne veneers van lithiumdisilicaat (IPS e.max® Press), ontwikkeld voor minimaal invasieve esthetische correcties. Dankzij een dikte vanaf circa 0,3 mm kan in veel gevallen de natuurlijke tandstructuur grotendeels behouden blijven. Hierdoor zijn Easyfit® facings bijzonder geschikt voor esthetische verbeteringen in het front, met minimale preparatie.



### Esthetiek

- Zeer natuurlijke uitstraling dankzij hoge translucentie.
- Nauwkeurige kleurafstemming op de natuurlijke dentitie.
- Metaalvrije restauratie zonder cervicale verkleuring.



### Indicatie

- Correctie van kleine vorm- en standafwijkingen
- Maskeren van verkleuringen
- Sluiten van diastemen
- Esthetische verbeteringen in het front



### Preparatie en plaatsing

#### PREPARATIE

- Minimale reductie, afhankelijk van indicatie
- Egaliseren van oppervlakken indien nodig
- Diastemen en vormcorrecties vooraf beoordelen
- Kleurbepaling vooraf (stomp + gewenste eindkleur)

#### AFDRUK

- Digitaal of conventioneel
- Siliconen of elastomeren
- Geen alginaten

#### PLAATSING

- Adhesieve verlijming aanbevolen



### Voordelen

- Maximaal behoud van natuurlijke tandstructuur
- Minimale preparatie (vanaf  $\pm 0,3$  mm).
- Hoge kleurstabiliteit
- Duurzame esthetische oplossing
- Geschikt voor snelle esthetische behandelingen



### Informatie

#### MATERIAAL

- **IPS e.max® Press** – Ivoclar

#### TECHNIEK

- Perskeramiek
- Hoge sterkte ( $\pm 470$  MPa)

## Tip van onze tandtechnische adviseur Rosario



Wanneer een patiënt een esthetische verbetering wenst, maar u zo weinig mogelijk gezond tandweefsel wilt prepareren, zijn Easyfit® facings vaak een uitstekende oplossing. Dankzij de ultra-dunne opbouw kunnen vorm-, kleur- en kleine standscorrecties worden uitgevoerd met maximaal behoud van natuurlijke tandstructuur.

Rosario, tandtechnische adviseur Protilab

