


Technische informatie FRAMEPROTHESE

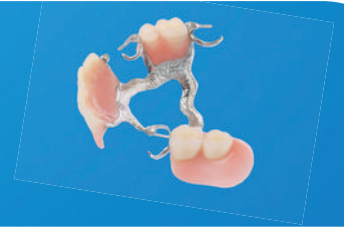

Een frameprothese is een uitneembare voorziening voor het vervangen van meerdere ontbrekende elementen. Dankzij de metalen basis biedt deze oplossing een stabiele, duurzame en kostenefficiënte behandeling met behoud van de resterende dentitie.



Esthetiek

- Discrete retentievoorzieningen mogelijk
- Kleur afgestemd op de bestaande dentitie (VITA)
- Natuurlijke uitstraling



Indicatie

- Partieel tandverlies
- Wanneer implantaten of vaste restauraties geen optie zijn
- Situaties waarbij functionaliteit voorop staat
- Uitbreidbare oplossing bij toekomstig tandverlies



Afdruk en plaatsing

AFDRUK

- Digitaal of conventioneel mogelijk
- Geen alginaten voor de definitieve afdruk
- Partiële prothese: primaire afdruk en individuele lepel
- Volledige prothese: secundaire afdruk voor optimale pasvorm

PLAATSING

- Controle van pasvorm, retentie en stabiliteit
- Eventuele drukplaatsen corrigeren
- Instructie over gebruik en onderhoud van de voorziening



Voordelen

- Stabiele constructie en goede krachtverdeling
- Duurzame metalen basis
- Uitbreidbaar bij toekomstig tandverlies
- Kostenefficiënte behandeling
- Implantaatondersteuning mogelijk voor extra stabiliteit



Informatie

MATERIAAL

- **CoCr-legering** – Bego Wironit
- **Kunststof elementen** – Ivoclar
- **Nylon** elementen (optioneel)

TECHNIEK

- CAD/CAM of conventionele vervaardiging
- Nauwkeurige pasvorm en retentie

Tip van onze tandtechnische adviseur Eva



In de praktijk zie ik dat een frameprothese vaak een uitstekende oplossing is voor patiënten met partieel tandverlies. De combinatie van stabiliteit, draagcomfort en uitbreidbaarheid maakt het mogelijk om de voorziening eenvoudig aan te passen wanneer de mondsituatie in de toekomst verandert.

Eva, tandtechnische adviseur Protilab