

Technische informatie PROTI-FLEX PROTHESE



De Proti-Flex prothese is een flexibele, uitneembare partiële prothese en een esthetisch alternatief voor een conventionele frameprothese. Dankzij het gebruik van TCS® (nylon kunststof) biedt deze oplossing een combinatie van draagcomfort, flexibiliteit en een natuurlijke uitstraling.



Esthetiek

- Metaalvrije constructie zonder zichtbare klammers
- Natuurlijke integratie met gingiva en dentitie
- Discrete en esthetische retentie



Afdruk en plaatsing

AFDRUK

- Primair: alginaat.
- Secundair: individuele lepel aanbevolen voor optimale pasvorm.
- Digitaal mogelijk, maar conventioneel vaak nauwkeuriger voor weke delen

AFDRUKMATERIAAL

- Digitaal of conventioneel
- Siliconen of elastomeren
- Geen alginaten.

PLAATSING

- Controle van pasvorm en retentie
- Eventuele drukplaatsen corrigeren
- Thermische aanpassingen uitsluitend door de behandelaar volgens de TCS®-richtlijnen

UITVOERINGEN

- Unilateraal: tijdelijke voorziening tijdens implantaatbehandeling
- Bilateraal: esthetische oplossing bij partieel tandverlies
- Combinatie met frame: extra stabiliteit bij vrij-eindigende situaties



Indicatie

- Partieel tandverlies
- Esthetisch veeleisende situaties
- Patiënten met metaalallergieën
- Tijdelijke en overgangsvoorzieningen
- Wanneer een metaalvrije oplossing gewenst is



Voordelen

- Lichtgewicht en comfortabel draaggevoel
- Flexibel materiaal (TCS® nylon kunststof)
- Goede retentie zonder metalen klammers
- Esthetisch alternatief voor een frameprothese
- Goed te combineren met andere prothetische oplossingen

BEPERKING

- Niet geschikt voor uitbreiding of rebasing



Informatie

MATERIAAL

- **Nylon kunststof** - TCS
- **Kunststof elementen** - Ivoclar

TECHNIEK

- Injectietechniek.
- Flexibele, metaalvrije constructie.

Tip van onze tandtechnische adviseur Gregory



De Proti-Flex prothese kan indien nodig door de behandelaar met warm water worden geactiveerd voor kleine aanpassingen aan de pasvorm. Adviseer patiënten nadrukkelijk om dit niet zelf te doen, aangezien onjuist verwarmen kan leiden tot vervorming van de voorziening.

Gregory, tandtechnische adviseur Protilab

