

Technische informatie VOLLEDIGE PROTHESE



Een volledige prothese vervangt alle tanden in een tandeloze kaak en herstelt functie, esthetiek en spraak. Dankzij een individuele opstelling en nauwkeurige pasvorm biedt deze voorziening een betrouwbare oplossing voor edentate patiënten. Indien gewenst kan de prothese worden gecombineerd met implantaten voor extra stabiliteit.



Esthetiek

- Natuurlijke uitstraling van tanden en gingiva
- Individuele opstelling afgestemd op de patiënt
- Kleurstabiele materialen



Indicatie

- Volledige tandeloosheid
- Situaties waarin vaste restauraties geen optie zijn
- Implantaatgedragen ondersteuning mogelijk



Afdruk en plaatsing

AFDRUK

- Primaire afdruk in alginaat
- Secundaire afdruk met individuele lepel (Permlastic® of zinkoxidepasta)
- Digitale afdruk mogelijk, conventionele afdruk aanbevolen voor een optimale registratie van de weke delen
- Definitieve afdruk in siliconen of elastomeren

AFDRUKMATERIAAL

- Siliconen of elastomeren (geen alginaten voor definitieve afdruk).

PLAATSING

- Controle van pasvorm, occlusie en stabiliteit
- Eventuele drukplaatsen corrigeren
- Instructie over gebruik en onderhoud van de voorziening



Voordelen

- Herstel van kauwfunctie, spraak en esthetiek
- Goede biocompatibiliteit
- Aanpasbaar bij veranderingen van de kaak
- Kostenefficiënte oplossing
- Te combineren met implantaten voor extra houvast



Informatie

MATERIAAL

- **Kunststof basis** - Vertex Dental
- **Kunststof elementen** - Ivostar, Gnathostar

TECHNIEK

- Conventionele of digitale vervaardiging.
- Individuele opstelling en beetbepaling.

Tip van onze tandtechnische adviseur Gianni



In de praktijk zie ik dat het succes van een volledige prothese sterk afhangt van een nauwkeurige afdruk, een correcte beetregistratie en een individuele opstelling. Door hier voldoende aandacht aan te besteden, creëren we samen een stabiele, comfortabele en esthetische voorziening voor de patiënt.

Gianni, tandtechnische adviseur Protilab

